



Actif sur Coronavirus  
BCoV selon EN 14476



Réf. 771045A

## Avantages produit

# TENORBACT+ LINGETTES

## Lingettes antiseptiques et désinfectantes sans rinçage pour les mains, objets, surfaces et dispositifs médicaux non invasifs\*

\*lingettes désinfectantes destinées à la maîtrise des risques microbiologiques liés à l'environnement (exemples : lits, tables d'opération, moniteurs...).

Idéales en milieu médical et paramédical, hôpitaux, centres de soins, laboratoires d'analyses, services urgences... et également en milieux alimentaires.

Multi-usages : mains et surfaces. Imprégnées d'une solution bactéricide, levuricide, et virucide spectre limité.

Conçues et fabriquées en France.

### PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES DE LA SOLUTION

#### Actif sur bactéries :

EN 1276\*(30s), EN 13727\*(30s), EN 1500 (2x 45 s), EN 16615\*

#### Actif sur mycobactéries

EN 14348\* sur *M.avium* et *M.terrae*.

#### Actif sur Levures et moisissures :

EN 1650\* *Candida albicans* (30 s), EN 13624\* *Candida albicans* (30 s),

EN 13624\* *Aspergillus brasiliensis* (1 min),

EN 16615\* *Candida albicans* (5 min).

#### Actif sur virus :

EN 14476\* Coronavirus BCoV, H1N1, Rotavirus (30 s), EN 14476\*

Norovirus, Adénovirus, Vaccine (1 min).

\*Normes réalisées en conditions de propreté

### MODE D'EMPLOI

Avant utilisation, enlever le couvercle et amorcer la lingette du centre du rouleau dans l'orifice du couvercle avec les mains propres.

Usage sur les mains: Frotter une lingette pendant 45 secondes. A renouveler avec une seconde lingette.

Usage sur les surfaces : Appliquer la lingette de manière à humidifier la surface à désinfecter. Laisser agir 5 minutes.

Bien refermer la boîte après usage pour éviter le dessèchement.

Ne pas utiliser une lingette sèche. Ne pas rincer.

### CARACTERISTIQUES

Non-tissé: viscosité blanche

pH: (pur) 4,5-6,5

Odeur : mentholée

Substances actives de la solution: Ethanol N°CAS n° 64-17-5 (660,10 g/kg i.e. 73% volume/volume)

Produit biocide TP1, TP2 et TP4, à usage professionnel, prêt à l'emploi.

### CONDITIONNEMENT

Réf. 771045A Carton de 12 boîtes de 100 lingettes

### CONSERVATION

Conserver dans son emballage d'origine fermé et dans des conditions normales de stockage. Avant ouverture conservation 24 mois à l'abri de la chaleur, dans les conditions normales de températures.

Dès l'ouverture, utiliser dans le mois.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.

Ne pas avaler. Ne pas utiliser avec d'autres produits.

Ce produit est réservé à l'usage externe, sur peau saine exclusivement.

Ce produit est réservé à l'usage des surfaces des objets et petits matériels ne présentant pas de rugosité. L'utilisation des lingettes ne dispense pas du protocole de nettoyage (préalable à toute désinfection), ni du protocole de stérilisation des instruments (pouvant être stérilisés par un procédé approprié).

En cas de réutilisation, risque de contamination.

En cas d'urgence, contacter le centre antipoison le plus proche.

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Usage réservé aux professionnels.

En cas d'urgence, contacter le Centre Antipoison France :

+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)



Version 220328

0 800 300 560

Service & appel  
gratuits

Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : [www.heegeo.fr](http://www.heegeo.fr)

HEEGEO - 10 rue Louis Rodas 19100 Brive-la-Gaillarde